



# 植入式动物体温表

型号：SH260U

## 操作说明书

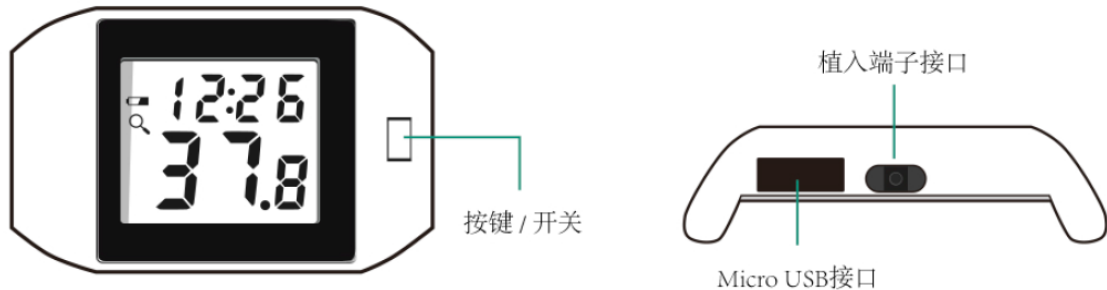

### 1、LCD 显示

- 上电显示时钟，下排显示体温测量值
- 屏幕右上角图标含义： —— 电池低压、闪烁时为充电状态
- LCD 显示：HI—传感器短路或体温测量值超过 43℃  
Er—传感器探头未接入或传感器线已断开  
DL—存储器清零操作  
CL—存储器清零完成  
Lo—温度测量值 低于 32℃。

### 2、按键操作



**开机/关机：**在关机状态下，长按键 3 秒体温表开机；在开机状态下，长按键 3 秒体温表关机。当测量值高于 43℃或低 32℃时间超过 15 分钟时，体温表将自动关机。

**清除数据：**在开机状态下，短按按键，LCD 显示 DL，10 秒内再次短按按键，LCD 显示 CL，表示数据已清除，若 10 秒无按键动作返回正常显示状态。

**复位：**短按复位键，体温表重启复位，体温表时间恢复出厂设置，其它参数设置不影响。

**注：**体温表与 RtView 软件连接后，按键功能自动失效。

### 3、充电


在开机状态下，当体温表电池电压低时，电池低压图标  显示，请及时充电，将 USB 线插入 USB 插槽，通过电脑或电源适配器充电。否则显示关闭后将不能正常开机。体温表充电时图标  闪烁，电充满后图标消失，一般充电 4 小时即可。



注意事项：体温表充电一次可使用 1 个月（默认存储间隔为 15 分钟，使用时间与存储间隔有关，间隔越小越使用时间也就越短），若体温表长期不使用应保证三个月充电一次，否则需退回生产厂家有偿维修。

## 4、应用软件 RtView

### —USB 驱动安装

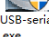体温表与电脑通过 USB 连接，在 RtView 软件使用前需安装 USB 串口驱动，点击运行  程序，安装 USB 串口驱动。

### —RtView 软件



软件采用绿色免安装方式，直接运行 “RtView.exe” 程序即可，如下图：



输入用户名：admin；密码：123456；验证码，点击“登录”，打开软件主界面，如下图：




**时钟：** 点击弹出时间设置页面如下图，点击“确定”，将时间设置到体温表中。



**温度单位：** 软件具有摄氏与华氏温度单位转换功能，默认摄氏度（℃）。点击“温度单位”弹出下拉菜单选择摄氏与华氏单位，然后点击“Enter”键确认。


## 一数据下载

将体温表**新增**历史数据上传到 RtView 软件，点击“导出 Excel”将数据保存到“Download”文件内；点击“打开”可打开已导出的体温记录表。

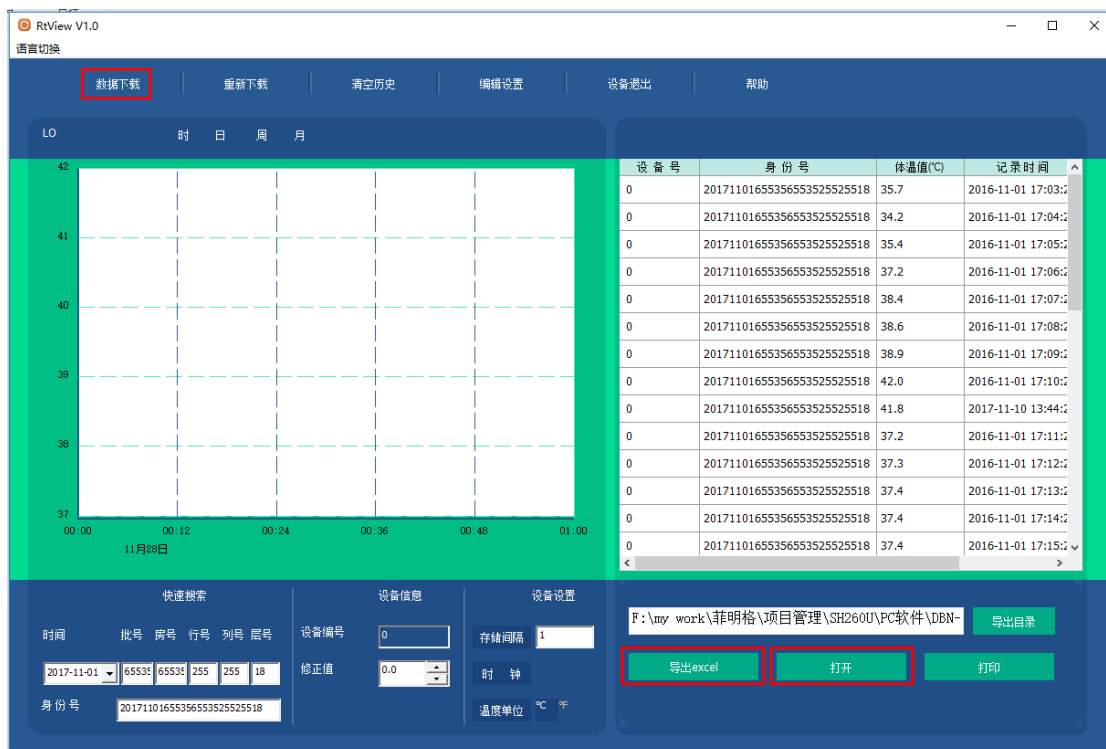

## 一重新下载

将体温表内**全部**历史数据上传到 RtView 软件，点击“导出 Excel”将数据保存到“Download”文件内；点击“打开”可打开已导出的体温记录表。

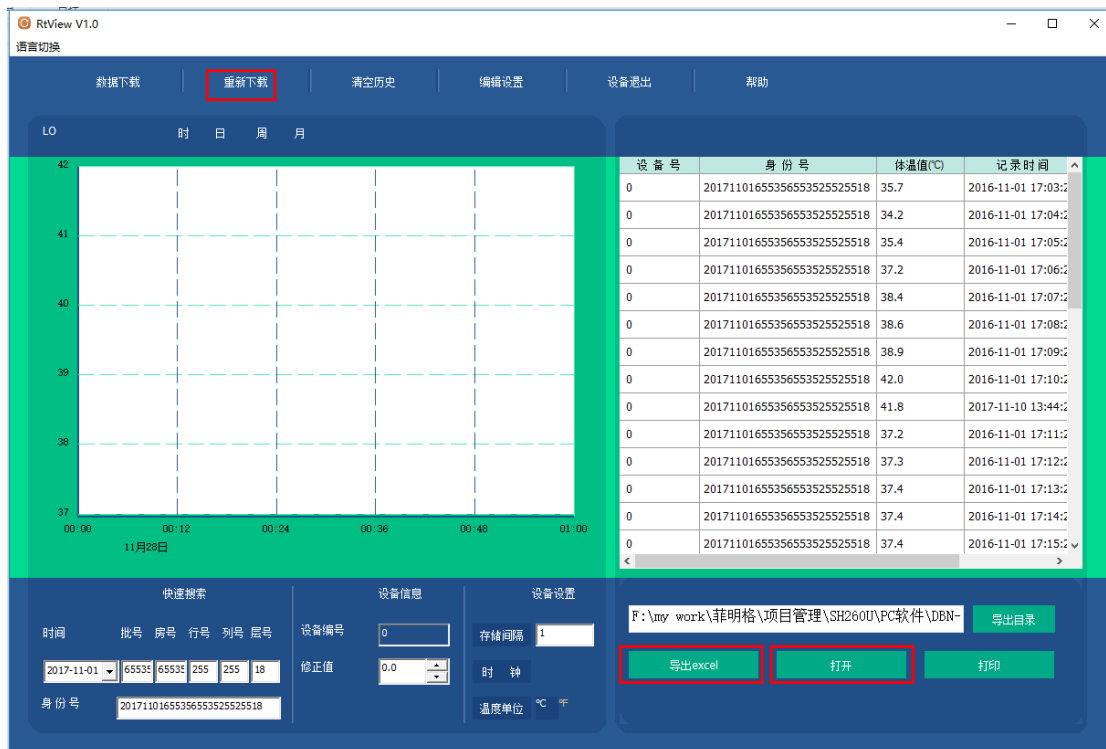

## 一清空历史

点击“清空历史”将清除体温表内全部历史数据，数据清零。

注意：使用此功能前，请确保体温表的数据已下载保存。

## 一编辑设置

“编辑设置”为未来扩展功能，此版本软件不适用。

## 一设备退出

点击“设备退出”强制中断一次 USB 通讯连接，此时可安全拔出体温表。

## 一帮助

点击“帮助”查看软件基本信息。

## 一导出目录

点击“导出目录”可以更改保存体温数据表的路径，默认存储在“Download”文件内。

## 一导出 Excel

点击“导出 Excel”将数据保存到“Download”或用户指定文件夹内；

## 一打开

点击“打开”可打开已导出的体温记录表。

## 一打印

点击“打印”可打开已导出的体温记录表，再点击 Excel 表中打印按钮即可打印体温记录表。

## 一软件退出

点击“×”关闭退出 RtView 软件。